

# OPTI-FREE® RepleniSH® Solution Multi-Fonctions de Décontamination

## Notice pour toutes les tailles de flacon

NOTICE

06-03-08

Lire attentivement cette notice et la conserver pour la réutiliser.

### OPTI-FREE® RepleniSH® Solution Multi-Fonctions de Décontamination

Pour un confort de port prolongé,  
Rénovation de la surface des lentilles avec maintien d'une hydratation optimale

Sans massage

Nettoyage, Rénovation, Rinçage, Décontamination et Conservation

Pour toutes les lentilles de contact souples y compris les lentilles en silicone hydrogel

#### **DESCRIPTION :**

**OPTI-FREE® RepleniSH® Solution Multi-Fonctions de Décontamination** est une solution aqueuse stérile, tamponnée, isotonique contenant du citrate de sodium, du chlorure de sodium, du borate de sodium, du propylène glycol, TEARGLYDE® agent rénovant à double action (TETRONIC® 1304† acide nonanoyl éthylène diamine triacétique) et les conservateurs POLYQUAD® (polyquaternium-1) 0,001% et ALDOX® (myristamidopropyl diméthylamine) 0,0005%.

†TETRONIC® est une marque déposée de BASF.

#### **ACTIONS :**

Lorsqu'il est utilisé selon la notice, **OPTI-FREE® RepleniSH® Solution Multi-Fonctions de Décontamination** :

- Nettoie en décollant et en éliminant les accumulations de protéines, les dépôts et autres débris de la surface de la lentille lors de la décontamination et de la conservation.
- Détruit les microorganismes (germes) nuisibles de la surface des lentilles.
- Rince et conserve vos lentilles de contact souples (hydrophiles) y compris les lentilles en silicone hydrogel.
- Formulé pour décontaminer et conserver les lentilles jusqu'à 30 jours après la décontamination.

En cas d'utilisation quotidienne d'**OPTI-FREE® RepleniSH® Solution Multi-Fonctions de Décontamination**, aucun nettoyant enzymatique distinct n'est nécessaire.

Aucune solution saline n'est nécessaire avec **OPTI-FREE® RepleniSH® Solution Multi-Fonctions de Décontamination**.

#### **INDICATIONS (utilisation) :**

A utiliser quotidiennement pour le nettoyage, la préparation à la pose, le rinçage, l'élimination des dépôts protéiques, la décontamination chimique (non thermique) et la conservation de toutes les lentilles de contact souples (hydrophiles) y compris les lentilles en silicone hydrogel, selon les recommandations de votre spécialiste.

## **AMELIORATION DU CONFORT ET DE L'HYDRATATION POUR LES PORTEURS DE LENTILLES :**

Quand vos lentilles trempent dans leur étui de trempage, **OPTI-FREE® RepleniSH® Solution Multi-Fonctions de Décontamination** rénove quotidiennement la surface des lentilles en y adsorbant un complexe mouillant déposé, permettant qu'une fine couche humide provenant des larmes reste à la surface de la lentille tout au long de la journée. Ceci procure un écran humide permanent entre la lentille et l'œil pour un confort de port toute la journée. Cet écran hydratant à la surface de la lentille prévient l'apparition de rougeurs oculaires chez de nombreux patients.

Augmentation du confort pour les porteurs de lentilles souples les plus courantes, qui éprouvent de l'inconfort.

Rénovation des lentilles pour maintenir l'hydratation de la surface, permettant à de nombreux patients de bénéficier d'une vision plus nette en fin de journée.

## **CONTRE-INDICATIONS (dans quels cas ne pas utiliser) :**

Les personnes allergiques à l'un des composants d'**OPTI-FREE® RepleniSH® Solution Multi-Fonctions de Décontamination** ne doivent pas utiliser ce produit.

## **INSTRUCTIONS D'ORDRE GENERAL :**

- Retirer complètement la bague de sécurité avant utilisation.
- Lavez-vous et rincez-vous systématiquement les mains avant de manipuler vos lentilles.
- Nettoyer, rénover, rincer et décontaminer vos lentilles chaque fois que vous les retirez.
- Commencer toujours la manipulation par la même lentille, gauche ou droite, pour éviter de les confondre.
- Après utilisation, videz toujours le contenu de l'étui de trempage, rincez-le avec **OPTI-FREE® RepleniSH® Solution Multi-Fonctions de Décontamination** et laissez-le sécher à l'air.

## **INSTRUCTIONS POUR LE NETTOYAGE, LA RENOVATION, LA DECONTAMINATION ET L'ELIMINATION DES PROTEINES :**

- Rincez abondamment chaque face de la lentille (5 secondes) avec **OPTI-FREE® RepleniSH® Solution Multi-Fonctions de Décontamination**.
- Remplissez votre étui de trempage Alcon® avec une nouvelle quantité suffisante d'**OPTI-FREE® RepleniSH® Solution Multi-Fonctions de Décontamination**. Laissez les lentilles dans l'étui de trempage fermé toute la nuit ou au moins pendant 6 heures. Après rinçage les lentilles sont prêtes à être portées.

Si des débris restent sur vos lentilles de contact, rincez-les avec **OPTI-FREE® RepleniSH® Solution Multi-Fonctions de Décontamination** avant la pose. Vous pouvez laisser vos lentilles dans leur étui de trempage non ouvert et contenant **OPTI-FREE® RepleniSH® Solution Multi-Fonctions de Décontamination** pendant 30 jours. Au-delà, vos lentilles doivent être à nouveau nettoyées et décontaminées avec **OPTI-FREE® RepleniSH® Solution Multi-Fonctions de Décontamination** tous les 30 jours et avant d'être portées.

Vos yeux sont uniques. Votre spécialiste peut vous recommander d'utiliser des produits ou des procédés complémentaires pour entretenir vos lentilles, en fonction de la qualité de vos larmes et de la fréquence d'utilisation de vos lentilles. Suivez toujours les instructions de votre spécialiste. Ne changez pas les instructions d'entretien de vos lentilles sans consulter votre spécialiste.


Si votre spécialiste vous demande de masser vos lentilles, mettez plusieurs gouttes sur la lentille et massez-les pendant plusieurs secondes. Puis suivez les instructions ci-dessus.

### **MISES EN GARDE :**

Pour bien utiliser et prendre soin de vos lentilles et produits d'entretien, y compris l'étui de trempage, il est essentiel de suivre les instructions de votre spécialiste et toutes celles de la notice.

Si vous ressentez une gêne persistante dans l'œil, un larmoiement excessif, des modifications de la vision, ou une rougeur de l'œil, retirez IMMEDIATEMENT vos lentilles et consultez votre ophtalmologiste, car le problème pourrait s'aggraver.

### **PRECAUTIONS :**

- Utilisez toujours une nouvelle quantité d'**OPTI-FREE® RepleniSH® Solution Multi-Fonctions de Décontamination**. Ne jamais réutiliser la solution de votre étui de trempage.
- Pour éviter toute contamination, ne jamais rien toucher avec l'embout du flacon.
- Remplacez le capuchon après utilisation.
- A conserver à température ambiante. Stocker verticalement.
- A utiliser avant la date de péremption indiquée sur le produit. 
- Jetez toute solution restante six mois après la première ouverture.
- Ne pas laisser à la portée des enfants.
- Ne pas utiliser pour une décontamination à chaud (thermique).

### **PRESENTATION :**

**OPTI-FREE® RepleniSH® Solution Multi-Fonctions de Décontamination**, stérilisé par filtration, est disponible en flacon plastique de 60 ml à 480 ml.

STERILE	A
---------	---

Etui de trempage ALCON®. (**OPTIONNEL**)

### **DISTRIBUE PAR : (OPTIONNEL)**

Laboratoires ALCON  
4, rue Henri Sainte Claire Deville  
F-92563 RUEIL MALMAISON Cedex

### **FABRICANT :**

Alcon Laboratories, Inc.  
6201 South Freeway  
Fort Worth, Texas USA 76134-2099

### **MANDATAIRE DANS L'UE :**

Alcon Laboratories (U.K.) Ltd.  
Boundary Way  
Hemel Hempstead  
Hertfordshire  
HP2 7UD Royaume-Uni

Brevets U.S. Nos. 5,393,491 ; 5,573,726 ; 5,631,005 ; 6,143,799 ; 6,365,636 ; 6,503,497 ; et 6,995,123

**CE 0123**

© 2009 Alcon, Inc.