

OPTI-FREE® Express®

SOLUTION
MULTI-FONCTIONS
DE DECONTAMINATION

CONFORT PROLONGÉ SANS MASSAGE

Lire attentivement cette notice et la conserver pour la réutiliser.

DESCRIPTION:

OPTI-FREE® EXPRESS® Solution Multi-Fonctions de Décontamination contient POLYQUAD® et ALDOX® qui détruisent les microorganismes nuisibles mais sont doux pour l'œil. Il contient aussi du citrate, qui élimine les dépôts de protéines des lentilles lors du trempage.

OPTI-FREE® EXPRESS® SMFD procure un confort de port pour toute la journée, y compris pour les yeux sensibles.

OPTI-FREE® EXPRESS® SMFD hydrate vos lentilles et diminue les risques d'irritation légère et de gêne lors du port de vos lentilles. Avec OPTI-FREE® EXPRESS® SMFD, l'utilisation d'une solution saline n'est pas nécessaire. OPTI-FREE® EXPRESS® SMFD est indiqué pour la décontamination, le nettoyage, le rinçage, l'hydratation et la conservation de toutes les lentilles de contact souples, y compris les lentilles en silicone hydrogel.

COMPOSITION:

OPTI-FREE® EXPRESS® SMFD est une solution aqueuse stérile, tamponnée, isotonique contenant du chlorure de sodium, du sorbitol, de l'édétate disodique, de l'acide borique, de l'aminométhylpropanol, du citrate et TETRONIC® 1304 comme agents nettoyants, POLYQUAD® (chlorure de polydronium) 0,001% et ALDOX® (myristamidopropyl diméthylamine) 0,0005%.

CONTRE-INDICATIONS (dans quels cas ne pas utiliser ce produit):

Les personnes allergiques à l'un des composants d'OPTI-FREE® EXPRESS® SMFD ne doivent pas utiliser ce produit.

INSTRUCTIONS D'ORDRE GÉNÉRAL:

- Lavez-vous et rincez-vous toujours les mains avant de manipuler vos lentilles de contact. Commencez toujours la manipulation par la même lentille, gauche ou droite, pour éviter de les confondre.
- Avant d'utiliser un nouvel étui de trempage ALCON®, rincez-le avec OPTI-FREE® EXPRESS® SMFD afin d'éliminer tout débris.
- Après utilisation, videz toujours l'étui de trempage, rincez-le avec OPTI-FREE® EXPRESS® SMFD et laissez-le sécher à l'air. Les Laboratoires Alcon vous recommandent de remplacer fréquemment votre étui de trempage.

INSTRUCTIONS POUR LE NETTOYAGE, LA DECONTAMINATION ET L'ÉLIMINATION DES PROTÉINES:

Rincez abondamment chaque face de la lentille avec OPTI-FREE® EXPRESS® SMFD. Remplissez votre étui de trempage ALCON® avec une nouvelle quantité d'OPTI-FREE® EXPRESS® SMFD suffisante pour couvrir les lentilles. Laissez les lentilles dans l'étui de trempage fermé toute la nuit ou au moins pendant 6 heures. Avant de porter vos lentilles, rincez abondamment chaque face de la lentille afin d'éliminer tout débris. Votre spécialiste peut vous recommander d'utiliser des produits complémentaires ou des procédés complémentaires pour entretenir vos lentilles, en fonction de la qualité de vos larmes et de la fréquence d'utilisation de vos lentilles. Suivez toujours les instructions de votre spécialiste. Il est possible de conserver vos lentilles dans un étui non ouvert pendant 30 jours maximum, jusqu'à ce qu'elles soient prêtes à être portées. Si vous conservez vos lentilles plus longtemps, il faut les nettoyer

et les décontaminer avec une nouvelle quantité de solution tous les 30 jours et avant de les porter.

HYDRATATION:


En cas d'irritation légère, de gêne ou de vision trouble lors du port de vos lentilles de contact, mettez 1 ou 2 gouttes d'OPTI-FREE® EXPRESS® SMFD directement dans l'œil et clignez des yeux 2 ou 3 fois. Vous pouvez utiliser OPTI-FREE® EXPRESS® SMFD pour hydrater vos lentilles autant de fois que vous en avez besoin pendant la journée.

MISES EN GARDE:

Pour bien utiliser et prendre soin de vos lentilles et produits d'entretien, y compris l'étui de trempage, il est essentiel de suivre les instructions de votre spécialiste et toutes celles de la notice.

Si vous ressentez une gêne persistante dans l'œil, un larmoiement excessif, des modifications de la vision, ou une rougeur de l'œil, retirez IMMÉDIATEMENT vos lentilles et consultez votre ophtalmologiste, car le problème pourrait s'aggraver.

PRECAUTIONS:

- Utilisez toujours une nouvelle quantité d'OPTI-FREE® EXPRESS® SMFD. Ne jamais réutiliser la solution de votre étui de trempage.
- Utilisez toujours l'étui de trempage ALCON®.
- Pour éviter toute contamination, ne jamais rien toucher avec l'embout du flacon.
- Remplacez le capuchon après utilisation.
- A conserver à température ambiante. Éviter les températures excessives.
- Gardez le flacon bien fermé quand vous ne l'utilisez pas.
- A utiliser avant la date de péremption indiquée sur le produit. 
- Jetez toute solution restante six mois après la première ouverture.
- Ne pas laisser à la portée des enfants.
- Ne pas utiliser pour une décontamination à chaud (thermique).

PRESENTATION:

OPTI-FREE® EXPRESS® SMFD, stérilisé par filtration, est disponible en flacons plastique de 60 ml à 470 ml.

DISTRIBUE PAR:

LABORATOIRES ALCON

STERILE	A
---------	---

4, rue Henri Sainte Claire Deville
F-92563 RUEIL MALMAISON Cedex
www.optifree.fr

FABRICANT:

Alcon Laboratories, Inc.
6201 South Freeway
Fort Worth, Texas, USA 76134-2099

MANDATAIRE DANS L'UE:

Alcon Laboratories (U.K.) Ltd.
Boundary Way
Hemel Hempstead
Hertfordshire
HP2 7UD Angleterre

*TETRONIC® = marque déposée de BASF.

Brevets US n° 5,393,491 ; 5,573,726 ; 5,631,005 ;
6,319,464 ; et 6,365,636.
Brevets européens n° 0 669 803 et 0 948 357

