

PRESENTATION

OPTI-FREE® solution multi-fonctions, stérilisée par filtration, est disponible en boîtes d'unidoses de 10 ml ou 15 ml avec un étui de trempage Alcon®.



DISTRIBUE PAR

Laboratoires ALCON
4, rue Henri Sainte Claire Deville
F-92563 RUEIL MALMAISON Cedex

FABRICANT

ALCON Laboratories, Inc.
6201 South Freeway
Fort Worth, TX, USA, 76134-2099

REPRESENTANT DANS L'UNION EUROPEENNE

ALCON Laboratories (U.K.) Ltd.
Boundary Way
Hemel Hempstead
Hertfordshire
HP2 7UD Angleterre

CE 0123

Alcon

CONTRE-INDICATIONS (dans quel cas ne pas utiliser ce produit)

Les personnes allergiques à l'un des composants d'**OPTI-FREE® solution multi-fonctions** ne doivent pas utiliser ce produit.

INSTRUCTIONS D'ORDRE GENERAL

- Lavez-vous et rincez-vous toujours les mains avant de manipuler vos lentilles de contact.
- Commencez toujours la manipulation par la même lentille, gauche ou droite, pour éviter de les confondre.
- Avant d'utiliser un nouvel étui de trempage, rincez-le avec **OPTI-FREE® solution multi-fonctions** afin d'éliminer tout débris.
- Après utilisation, videz toujours votre étui de trempage, rincez-le et laissez-le sécher à l'air. Les Laboratoires Alcon vous recommandent de remplacer fréquemment votre étui de trempage.

INSTRUCTIONS POUR L'ENTRETIEN DE VOS LENTILLES

Conformez-vous aux instructions suivantes d'entretien de vos lentilles à chaque fois que vous les retirez, de façon à maintenir correctement leur propreté et leur décontamination. Une étape n'en remplace pas une autre.

- Lavez-vous les mains et rincez-les abondamment avant de manipuler vos lentilles de contact.
- Retirez, en tournant, la tête de l'unidoses d'**OPTI-FREE® solution multi-fonctions** et remplissez votre étui de trempage avec la solution.
- Retirez chaque lentille et nettoyez chaque face avec 2 gouttes d'**OPTI-FREE® solution multi-fonctions** ou avec un produit nettoyant journalier, selon les conseils de votre spécialiste. Nettoyez en frottant doucement dans la paume de la main.
- Rincez abondamment chaque face de la lentille avec **OPTI-FREE® solution multi-fonctions** jusqu'à ce que toutes les traces de produit de nettoyage ou les débris soient éliminés.



OPTI-FREE®

SOLUTION MULTI-FONCTIONS

Lire attentivement cette notice et la conserver pour la réutiliser.

DESCRIPTION

OPTI-FREE® solution multi-fonctions est une solution aqueuse, stérile, tamponnée, isotonique, contenant du chlorure de sodium, du citrate de sodium comme agent nettoyant et tampon, de l'édétate disodique 0,05% et du POLYQUAD® (chlorure de polidronium) 0,0011%.

MODE D'ACTION

OPTI-FREE® solution multi-fonctions nettoie en détachant et en supprimant l'accumulation des dépôts et débris sur vos lentilles. De plus, il élimine les protéines pendant le trempage de vos lentilles. **OPTI-FREE® solution multi-fonctions**, utilisé selon les indications du mode d'emploi, détruit les micro-organismes nuisibles à la surface des lentilles.

OPTI-FREE® solution multi-fonctions s'utilise pour rincer et conserver vos lentilles.

Aucune solution saline n'est nécessaire avec OPTI-FREE® solution multi-fonctions.

UTILISATIONS (indications)

Nettoyage, rinçage, décontamination et conservation de toutes les lentilles de contact souples (hydrophiles), transparentes ou colorées, en port journalier ou en port prolongé, dont les lentilles jetables et les lentilles à renouvellement fréquent.

L'étape de nettoyage et de rinçage de vos lentilles ne prend que peu de temps et élimine la contamination de surface et les micro-organismes.

Elle est TRES importante et ne doit pas être omise.

Chacune des deux lentilles doit être nettoyée et décontaminée à chaque retrait.

NE JAMAIS utiliser d'eau pour nettoyer vos lentilles.

- Après avoir frotté et rincé les deux lentilles, placez-les dans l'étui de trempage contenant **OPTI-FREE® solution multi-fonctions**, fermez-le soigneusement et laissez tremper toute la nuit ou pendant au moins 4 heures.

APRES LA DECONTAMINATION

Les lentilles sont maintenant prêtes à être portées. Un rinçage séparé n'est pas nécessaire. Avant de mettre vos lentilles, lavez-vous et séchez-vous les mains. Jetez la solution de décontamination usagée, rincez votre étui de trempage avec **OPTI-FREE® solution multi-fonctions** et laissez-le sécher à l'air.

MISES EN GARDE

Pour bien utiliser et prendre soin de vos lentilles et produits d'entretien, il est essentiel de suivre les instructions de votre spécialiste et toutes celles de la notice.

Si vous ressentez une gêne persistante dans l'oeil, un larmoiement excessif, des modifications de la vision, ou une rougeur de l'oeil, retirez IMMEDIATEMENT vos lentilles et consultez votre ophtalmologiste, car le problème pourrait s'aggraver.

PRECAUTIONS

Utilisez toujours une nouvelle quantité d'**OPTI-FREE® solution multi-fonctions**.

Ne jamais réutiliser la solution de votre étui de trempage.

A conserver à température ambiante.

A utiliser avant la date de péremption indiquée sur le produit.

Ne pas laisser à la portée des enfants.