



POLYRINSE™

SOLUTION SALINE

Lire attentivement cette notice et la conserver pour la réutiliser.

DESCRIPTION

POLYRINSE™ Solution Saline est une solution aqueuse stérile sans conservateur, isotonique, contenant du chlorure de sodium 0,9%.

MODE D'ACTION

Le rinçage avec **POLYRINSE™ Solution Saline** élimine les débris, les micro-organismes, et les solutions de nettoyage et de décontamination de vos lentilles de contact lorsqu'elle est utilisée avec une unité de décontamination thermique. Elle garde vos lentilles humides (hydratées) pendant la décontamination à chaud et la conservation.

UTILISATIONS (indications)

Pour le rinçage de toutes les lentilles de contact. **POLYRINSE™ Solution Saline** peut aussi être utilisée, avec un dispositif de chauffage, pour la décontamination thermique des lentilles de contact souples (hydrophiles) ou à chaque fois qu'une solution saline stérile est indiquée.

CONTRE-INDICATIONS (dans quel cas ne pas utiliser ce produit)

Aucune connue.

INSTRUCTIONS D'ORDRE GENERAL

- Lavez-vous et rincez-vous toujours les mains avant de manipuler vos lentilles de contact.
- Commencez toujours la manipulation par la même lentille, gauche ou droite, pour éviter de les confondre.
- Avant d'utiliser un nouvel étui de trempage, rincez-le avec **POLYRINSE™ Solution Saline** afin d'éliminer tout débris.
- Après utilisation, videz toujours votre étui de trempage, rincez-le avec **POLYRINSE™ Solution Saline** et laissez-le sécher à l'air. Les Laboratoires Alcon vous recommandent de remplacer fréquemment votre étui de trempage.

INSTRUCTIONS POUR L'ENTRETIEN DE VOS LENTILLES

Utilisez **POLYRINSE™ Solution Saline** à chaque fois qu'une solution saline est recommandée dans le cadre de l'entretien de vos lentilles de contact.

- Retirez, en tournant, la tête de l'unidose.
- Jeter l'unidose après utilisation.

MISES EN GARDE

Pour bien utiliser et prendre soin de vos lentilles et produits d'entretien, il est essentiel de suivre les instructions de votre spécialiste et toutes celles de la notice. Si vous ressentez une gêne persistante dans l'œil, un larmoiement excessif, des modifications de la vision, ou une rougeur de l'œil, retirez IMMEDIATEMENT vos lentilles et consultez votre ophtalmologiste, car le problème pourrait s'aggraver.

PRECAUTIONS

- Utilisez toujours une nouvelle quantité de **POLYRINSE™ Solution Saline**. Ne jamais réutiliser l'ancienne solution de votre étui de trempage.
- Jeter la solution restante après utilisation. Ne pas conserver de solution dans une unidose ouverte.
- A conserver à température ambiante.
- A utiliser avant la date de péremption indiquée sur le produit. ⌚
- Ne pas laisser à la portée des enfants.

PRESENTATION

POLYRINSE™ Solution Saline, qui est stérilisée par filtration, est disponible en boîtes d'unidoses de 15 ml.

STERILE	A
---------	---

DISTRIBUE PAR

Laboratoires ALCON
4, rue Henri Sainte-Claire Deville
F-92563 RUEIL MALMAISON Cedex

FABRICANT

Alcon Laboratories, Inc.
6201 South Freeway
Fort Worth, TX, USA, 76134-2099

REPRESENTANT DANS L'UNION EUROPEENNE

Alcon Laboratories (U.K.) Ltd.
Boundary Way
Hemel Hempstead
Hertfordshire
HP2 7UD Angleterre

CE 0123

Alcon®